

KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

KaWe МедЧарж 4000 – это зарядное устройство для металлических рукояток серий KaWe ЕВРОЛАЙТ / KaWe EUROLIGHT®, KaWe КОМБИЛАЙТ / KaWe COMBILIGHT® а также серий ларингоскопов малого (AA) и среднего (C) типа размера, за исключением рукояток серии Эконом / Economy, LED 2,5 В и заряжаемых от сети рукояток.

Развитая электроника следит за ходом напряжения аккумуляторных ячеек в процессе зарядки. Вследствие этого предотвращается перезарядка аккумулятора, а срок службы отдельных ячеек используется оптимально. KaWe МедЧарж 4000 распознаёт тип аккумуляторов и их состояние зарядки, индивидуально определяя с помощью системы микроконтроля требуемую величину зарядки.

Зарядное устройство KaWe МедЧарж 4000 располагает интегрированной системой автоматического отключения.

Продолжительность работы аккумулятора среднего размера составляет примерно три часа, малого – приблизительно два часа, в зависимости от лампы.

KaWe МедЧарж 4000

зарядное устройство, в комплекте с блоком питания и со сменными сетевыми штепсельными вилками для новой Lithium-Ion технологии

объём поставки:

- блок питания
ЕС 240 В / ВБ 240 В / США 110 В
- два адаптера для рукояток (тип AA)
- настенное крепление

выбор различных блоков питания для аккумуляторных рукояток 2,5 В и 3,5 В

ВСЁ в ОДНОМ



блок питания

Арт. 12.80005.002



настенное крепление

для KaWe аккумуляторов 2,5 В и 3,5 В (NiMH, NiCd und Li-Ion)

Технические характеристики:

входное напряжение 100 В - 240 В +/- 10%, 50 - 60 Гц
 максимальный ток в сети 1,2 А
 степень эффективности 90 - 93 %
 ёмкость заряда мин. 250 mAh, макс. 4500 mAh
 входное напряжение зарядного устройства 9 VDC +/- 10 %
 исходное напряжение на холостом ходе 9 VDC
 номинальное исходное напряжение 2x 3,6 VDC

номинальный зарядный ток 2x 250 mA +/- 10 %
 ток по окончании зарядки 10 - 30 mA для Li-Ion
 прочность напряжения 4 kV
 защитный класс II
 допустимая температура окр. среды 0° C - +40° C
 допустимая температура при хранении -25° C - +70° C



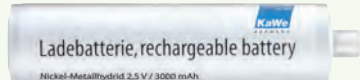
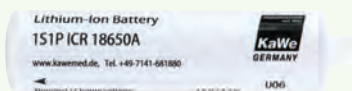
КаWe МедЧарж 4000

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

примеры
зарядки



Аккумуляторные батарейки для КаWe МедЧарж 4000

	для металлических аккумуляторных рукояток	время зарядки (ч)	ёмкость (mAh)	Арт.
тип AA, 2,5 В, NiMH, маленькая 	для КаWe МедЧарж 3000 + 4000 Внимание: данный аккумулятор не применять с LED рукояткой ларингоскопа 2,5 В.	прибл. 8	1600	12.80110.712 (28960)
тип AA, 3,5 В, NiMH, маленькая 	для КаWe МедЧарж 3000 + 4000	прибл. 4	750	12.80120.712
тип C, 2,5 В, NiMH, средняя 	для КаWe МедЧарж 3000 + 4000 Внимание: данный аккумулятор не применять с LED рукояткой ларингоскопа и отоскопа 2,5 В.	прибл. 14	3000	12.80110.722 (28965)
тип C, 3,5 В, Lithium-Ion (Li-Ion), средняя  преимущества Li-Ion аккумулятора – длительный срок службы – выс. концентрация энергии – отсутствие эффекта памяти – низкий саморазряд	для КаWe МедЧарж 4000 Внимание: данный аккумулятор исключительно для КаWe МедЧарж 4000	прибл. 8-10	2200	12.80220.722

Зарядка: перед первым использованием – не менее 10 ч.

Компетенция в медтехнике
известная во всём мире



“ - ”

<http://kawe.medtexst.ru/>
kawe@medtexst.ru

: (495) 902-59-26 , , (495) 518-55-99

-

KaWe.

KAWE.

-

,

!